

VITASEPT[®]WIPES

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ САЛФЕТКИ НА БАЗЕ АЛКОГОЛЯ

Салфетки Vitasept[®]Wipes - эффективное, с широким спектром воздействия средство для дезинфекции устойчивых к воздействию спирта поверхностей. Мягкие салфетки пропитаны средством для дезинфекции с широким спектром действия и не оставляют на поверхностях осадка, и поэтому идеально подходят для дезинфекции поверхностей, контактирующих с пищей и пищевыми продуктами.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- быстродействующее
- на базе алкоголя
- не содержит альдегидов и четвертичных соединений аммония
- не оставляет осадка
- особенно подходит для труднодоступных мест
- мягкий материал наподобие ткани

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Вытаскивать салфетки до перфорированного участка в необходимом количестве, при отрывании придерживая при необходимости другой рукой. Все поверхности тщательно протереть салфеткой Vitasept[®]Wipes и убедиться, что очищаемый участок полностью покрыт дезинфицирующим веществом. После использования салфетку следует выбросить. Чтобы салфетки не высыхали, следует всегда плотно закрывать крышку.

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ

60 секунд (EN 16615)

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ СПЕКТР

МИКРООРГАНИЗМ	УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ	КОНЦЕНТРАЦИЯ	КОНТАКТНОЕ ВРЕМЯ
<i>Acinetobacter baumannii</i>	грязные условия	неразбавленный	30 секунд
<i>Bacillus cereus</i>	грязные условия	неразбавленный	30 секунд
<i>Campylobacter spp.</i>	грязные условия	неразбавленный	30 секунд
<i>Clostridium spp.</i>	грязные условия	неразбавленный	30 секунд
<i>Enterobacter aerogenes</i>	грязные условия	неразбавленный	30 секунд
<i>Enterococcus faecalis</i>	грязные условия	неразбавленный	30 секунд
<i>Enterococcus hirae</i>	грязные условия	неразбавленный	30 секунд
<i>Escherichia coli</i>	грязные условия	неразбавленный	30 секунд
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	грязные условия	неразбавленный	30 секунд
<i>Listeria spp.</i>	грязные условия	неразбавленный	30 секунд
<i>Mycoplasma hyopneumoniae</i>	грязные условия	неразбавленный	30 секунд
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	грязные условия	неразбавленный	30 секунд

<i>Salmonella spp.</i>	грязные условия	неразбавленный	30 секунд
<i>Shigella dysenteriae</i>	грязные условия	неразбавленный	30 секунд
<i>Staphylococcus spp.</i> (вкл. MRSA)	грязные условия	неразбавленный	30 секунд
<i>Streptococcus spp.</i>	грязные условия	неразбавленный	30 секунд
<i>Vibrio cholerae</i>	грязные условия	неразбавленный	30 секунд
<i>Mycobacterium terrae</i>	грязные условия	неразбавленный	30 секунд
<i>Candida albicans</i>	грязные условия	неразбавленный	30 секунд
<i>Trichophyton mentagrophytes</i>	грязные условия	неразбавленный	30 секунд
Гепатит В, гепатит С, ВИЧ	грязные условия	неразбавленный	30 секунд
Herpes simplex	грязные условия	неразбавленный	30 секунд
Вирусы гриппа	грязные условия	неразбавленный	30 секунд
Вирус коровьей оспы	грязные условия	неразбавленный	30 секунд
Коронавирусы	грязные условия	неразбавленный	30 секунд
Аденовирус	чистые условия	неразбавленный	60 секунд
Норовирус	чистые условия	неразбавленный	60 секунд
Полиовирус	чистые условия	неразбавленный	60 секунд
Ротавирус	чистые условия	неразбавленный	30 секунд

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 16615

ДРУГИЕ ТЕСТОВЫЕ МЕТОДЫ

DVV/RKI

ХРАНЕНИЕ

См. срок годности, указанный на упаковке. Хранить при температуре 5-25°C, не хранить на открытом солнце.

УТИЛИЗАЦИЯ

Для повторного использования промыть упаковку водой

ОПАСНО!


Легко воспламеняющаяся жидкость и пар. Вызывает серьезное раздражение глаз. Может вызывать сонливость или головокружение. Держать в месте, не доступном для детей. Беречь от тепла/ искр/ открытого огня/ горячих поверхностей. – Не курить. Держать крышку контейнера плотно закрытой. ПРИ ПОПАДАНИИ В Г ЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.




СОСТАВ

100г продукта содержат следующие активные ингредиенты: изопропанол 60г, этанол 15г

УПАКОВКА

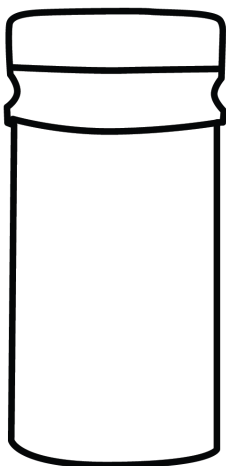

120шт в банке (20x20см)

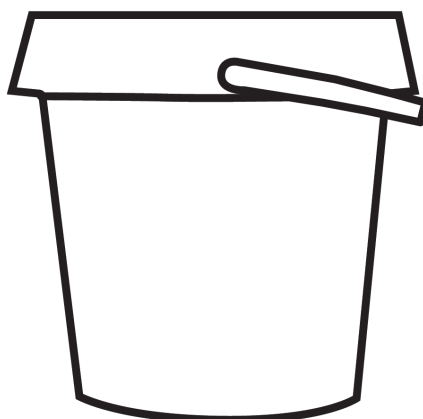

450шт в ведре (18x20см)



Goodpoint Chemicals OÜ
Urda tee 3, Jälgimäe 76404
Saku vald, Harjumaa, Estonia
www.goodpointchemicals.com
info@goodpointchemicals.com



Используйте дезинфицирующие средства безопасно. Перед использованием внимательно прочитайте информацию о продукте на этикетке.